

*save time
for you and
your baby*

medelaMe Babywaage

Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung in dieser Broschüre genau durch, bevor Sie die Waage in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung bitte auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen sorgfältig durch. Wenden Sie sich bei Problemen an die Medela GmbH unter 089 31 97 59-0.



WARNUNG

Zeigt gefährliche Situationen auf, die zu Tod oder schwerwiegenden Verletzungen führen können, wenn sie nicht vermieden werden. Um ernste Verletzungen und den Tod zu vermeiden, lesen und befolgen Sie die nachstehenden Gebrauchsanweisungen:

- I Babys bewegen sich sehr schnell und können von der Waage fallen. Um ernste Verletzungen zu vermeiden, muss immer ein Erwachsener nah genug sein, um das Baby festzuhalten.
- I Lassen Sie das Baby in einer sicheren Umgebung während Sie die Waage für das Wiegen vorbereiten. Bringen Sie das Baby sofort nach dem Wiegen zurück in eine sichere Umgebung. Das Baby könnte von der Waage fallen, wenn Sie unaufmerksam sind.
- I Heben Sie die Waage nicht an und klappen Sie die Waage nicht zusammen, wenn das Baby darauf liegt. Die Haut könnte eingeklemmt und Finger gebrochen werden.
- I Stellen Sie die Waage auf einen festen Untergrund. Das Baby könnte von der Waage fallen, wenn Sie die Waage auf einen weichen oder unebenen Untergrund stellen.
- I Halten Sie einen Abstand von zwei Armlängen zwischen der Waage und allen anderen Gegenständen ein. Das Baby könnte sich selbst von der Waage ziehen oder Gegenstände greifen und sich damit selbst verletzen.
- I Trocknen Sie das Baby vor dem Wiegen ab. Nasse Babys können von der Waage rutschen und sich verletzen.
- I Nur von Erwachsenen zu benutzen. Minderjährige sind möglicherweise nicht in der Lage, Gefahren zu erkennen und Verletzungen zu verhindern.
- I Halten Sie die Plastikverpackung fern von Babys und Kindern. Benutzen Sie die Plastiktüte nicht in der Wohnung, in Betten, Kinderwagen oder Laufgittern. Plastiktüten sind keine Spielzeuge. Der dünne Film kann die Atemwege verschließen und das Atmen verhindern.
- I Bewahren Sie Batterien immer außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern auf. Erstickungsgefahr.

- I Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, berühren Sie die Batterieflüssigkeit nicht. Zur Reinigung benutzen Sie ein trockenes Tuch. Hautkontakt vermeiden. Gefahr von Hautreizungen und Verbrennungen.
- I Ersetzen Sie immer den kompletten Satz Batterien. Benutzen Sie keine aufladbaren Batterien. Die Kombination von alten und neuen oder aufladbaren Batterien führt möglicherweise zur Explosion und zum Auslaufen der Batterieflüssigkeit.

HINWEIS

Zeigt gefährliche Situationen auf, die, wenn sie nicht vermieden werden, zu Sachschäden führen können. Um Schäden an Ihrer Babywaage zu verhindern, lesen und befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

- I Im Falle einer Fehlfunktion kontaktieren Sie den Händler oder die Medela GmbH. Nicht autorisierte Änderungen oder Reparaturen können Ihre Babywaage beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- I Waagen dürfen nicht nass werden. Flüssigkeiten (z.B. Wasser, Babyurin) können die Waage beschädigen. Benutzen Sie ein trockenes Tuch, z.B. ein Handtuch, um die Waage direkt abzutrocknen, nachdem Sie das Baby in eine sichere Umgebung zurückgebracht haben.
- I Öffnen, schließen und stellen Sie die Waage mit Vorsicht ab, um Schäden an den Scharnieren und der Waage zu vermeiden. Benutzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise	2
Inhaltsverzeichnis	4
1. Die Gewichtszunahme des gesunden, gestillten Babys	5
1.1 Wie viel soll das Baby an Gewicht zulegen?	5
1.2 Wie häufig sollen gestillte Kinder gewogen werden?	5
2. Überblick	6
2.1 Verwendungszweck	6
2.2 Richtlinien	6
2.2 FCC-Konformitätserklärung	7
3. Erste Schritte	8
3.1 Sicherheitshinweise	8
3.2 Vorbereitung des Wiegevorgangs	9
3.3 Umgang mit Batterien	10
4. Benutzung der Waage	11
4.1 Sicherheitshinweise	11
4.2 Wiegen und Trieren	12
4.3 Speicherfunktion	13
4.4 Ändern der Einheit von kg zu lbs	13
5. Datenübertragung	14
5.1 Sicherheitshinweise	14
5.2 Koppeln der Geräte	14
5.3 Gewichtsübertragung	15
5.4 Bluetooth™ Aktivierung/Deaktivierung	16
5.5 Anmerkungen	16
6. Tipps und Fehlerbeseitigung	17
6.1 Fehlerbeseitigung	17
6.2 Reinigung	17
6.3 Wartung	17
6.4 Entsorgung	18
6.5 Rechtliche Hinweise	18
7. Gewährleistung / Haftung	19

1. Die Gewichtszunahme des gesunden Babys

1.1 Wie viel soll das Baby an Gewicht zulegen?

Unter optimalen Bedingungen nehmen Jungen von 0 bis 2 Monaten 170 bis 330 g pro Woche zu, Mädchen 130 bis 330 g pro Woche. Danach wird die wöchentliche Gewichtszunahme langsamer. Eine durchschnittliche wöchentliche Gewichtszunahme von >120 g ist für die gesunde Entwicklung des Kindes notwendig.

1.2 Wie häufig sollen gestillte Kinder gewogen werden?

In der Regel werden junge Eltern in den ersten 2–3 Wochen ihr Kind täglich oder doch in kurzen Abständen wiegen. Es ist nicht notwendig, ein gesundes, termingeborenes Baby täglich zu wiegen. Es reicht aus, dies alle paar Tage oder einmal wöchentlich zu tun.

Wiegen Sie das Baby immer zur gleichen Tageszeit, immer vor oder nach dem Stillen und am besten nackt. Wenn Sie nur 1 mal wöchentlich wiegen, sollten Sie dies immer am gleichen Wochentag und zur selben Tageszeit tun.

Außer der Gewichtsanzeige auf der Waage zeigen Ihnen die folgenden Punkte an, dass Ihr gestilltes Baby ausreichend ernährt wird:

- I Seine Haut ist rosig
- I Es ist nach der Stillmahlzeit satt und zufrieden
- I Das Baby ist wach und aufmerksam
- I Es hat in 24 Stunden 5–7 nasse Windeln, der Urin ist häufig hell in der Farbe
- I Es hat während der ersten 6–8 Wochen ein- oder mehrmals täglich Stuhleerungen.

2. Überblick

2.1 Verwendungszweck

Die medelaMe Babywaage ist für das Wiegen von Säuglingen bis 66 cm Körpergröße und max. 15 kg Körpergewicht vorgesehen. Die Waage ist nur für die Nutzung im Innenbereich geeignet.

Dieses Produkt ist nur für den Privatgebrauch bestimmt. Dies ist kein medizinisches Gerät. Nehmen Sie keine medizinischen Diagnosen oder Entscheidungen vor, die auf dem Ergebnis der Waage basieren. Wenn Sie irgendwelche medizinischen Fragen oder Bedenken bezüglich der Gesundheit Ihres Babys haben, kontaktieren Sie Ihren Kinderarzt, Ihre Hebamme oder Stillberaterin.

2.2 Richtlinien

Die Waage ist konform mit den entsprechenden Vorgaben der EU-Richtlinien:

I 1999/5/EC, 1999/519/EC, EN 301 489-1 V.8.1 (2008-04), EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05), EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)	
I FCC-ID: TQ6BTMDC747	FC
I 2004/108/EC, EN 60601-1-2 (2007)	EMC
I 2001/95/EC	Richtlinien über allgemeine Produktsicherheit
I 1907/2006/EC	REACH
I 2002/95/EC	ROHS
I 2002/96/EC	WEEE
I 2006/95/EC	Niederspannung Richtlinien
I 2006/66/EC	Batterie Richtlinien
I 76/69/EC	Richtlinien für gefährliche Stoffe
I 2005/84/EC	Phthalat Richtlinien

Dieses Gerät ist entsprechend der geltenden EG-Richtlinie 2004/108/EC funktentstört. Unter extremen elektrostatischen sowie elektromagnetischen Einflüssen z.B. beim Betreiben eines Funkgerätes oder Mobiltelefons in unmittelbarer Nähe des Gerätes kann jedoch eine Beeinflussung des Anzeigewertes verursacht werden. Nach Ende des Störeinflusses ist das Produkt wieder bestimmungsgemäß benutzbar, ggfs. ist ein Wiedereinschalten erforderlich. Das Gerät ist ein Messgerät. Luftzug, Vibrationen, schnelle Temperaturänderungen und Sonneneinstrahlung können zur Beeinflussung des Wiegeergebnisses führen. Die Waage entspricht der Schutzart IP 54. Hohe Luftfeuchtigkeit, Dämpfe, aggressive Flüssigkeiten und starke Verschmutzung sind zu vermeiden.

2.2 FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Konformitätserklärung. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine unzulässigen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät darf nicht durch beliebige Einstrahlung in seiner Funktion gestört werden.

European Community Compliance Statement

Das Gerät entspricht dem RF Exposure Requirement 1999/519/EC, entsprechend der Empfehlung des Rates vom 12. Juli 1999 über die Begrenzung der Strahlenbelastung der Bevölkerung durch elektromagnetische Felder (0-300 GHz). Dieses drahtlose Gerät entspricht den R&TTE-Richtlinien.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Medela GmbH, dass diese Waage und das Bluetooth™-Modul mit den grundlegenden Anforderungen und relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmen.

3. Erste Schritte

3.1 Sicherheitshinweise

WARNUNG: Um ernste Verletzungen zu vermeiden, lassen Sie das Baby in einer sicheren Umgebung während Sie die Waage für das Wiegen vorbereiten. Babys bewegen sich sehr schnell und können von der Waage fallen, wenn Sie unaufmerksam sind. (Abbildung 1 + 2)

⚠️ WARNUNG: Stellen Sie die Waage auf einen festen Untergrund. Das Baby könnte von der Waage fallen, wenn Sie die Waage auf einen weichen oder unebenen Untergrund stellen. (Abbildung 3)

⚠️ WARNUNG: Halten Sie einen Abstand von zwei Armlängen zwischen der Waage und allen anderen Gegenständen ein. Das Baby könnte sich selbst von der Waage ziehen oder Gegenstände greifen und sich damit selbst verletzen.

⚠️ WARNUNG: Halten Sie die Plastikverpackung fern von Babys und Kindern. Benutzen Sie die Plastiktüte nicht in der Wohnung, in Betten, Kinderwagen oder Laufgittern. Plastiktüten sind keine Spielzeuge. Der dünne Film kann die Atemwege verschließen und das Atmen verhindern.

⚠️ WARNUNG: Bewahren Sie Batterien immer außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern auf. Erstickungsgefahr.

⚠️ WARNUNG: Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, berühren Sie die Batterieflüssigkeit nicht. Zur Reinigung benutzen Sie ein trockenes Tuch. Hautkontakt vermeiden. Gefahr von Hautreizungen und Verbrennungen.

⚠️ WARNUNG: Ersetzen Sie immer den kompletten Satz Batterien. Benutzen Sie keine aufladbaren Batterien. Die Kombination von alten und neuen oder aufladbaren Batterien führt möglicherweise zur Explosion und zum Auslaufen der Batterieflüssigkeit.

HINWEIS: Öffnen, schließen und stellen Sie die Waage mit Vorsicht ab, um Schäden an den Scharnieren und der Waage zu vermeiden.

Abbildung 1


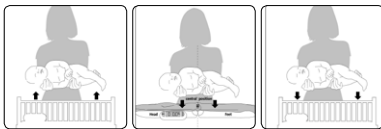


Abbildung 2




Abbildung 3

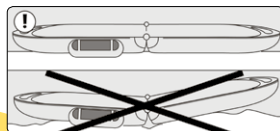

3.2 Vorbereitung des Wiegevorgangs


Entnehmen Sie die Waage der Verpackung und entfernen Sie die Plastikverpackung. Entfernen Sie das Unterteil der Waage. (siehe Abbildung 4)

Abbildung 4

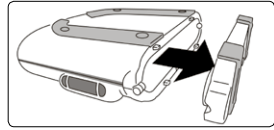


Öffnen Sie das Batteriefach im Inneren der Waage und legen Sie die Batterien ein. (4 x 1,5V AAA). Polarität beachten. (siehe Abbildung 5)

Abbildung 5

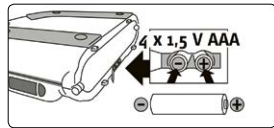


Öffnen Sie die Waage, indem Sie die Griffe auseinander ziehen und die Waage aufklappen bis sie flach auf dem Untergrund liegt. (siehe Abbildung 6)

Abbildung 6

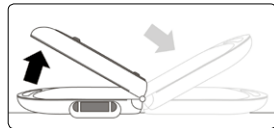

Die Waage ist in der richtigen Wiegeposition (siehe Abbildung 7)

Abbildung 7

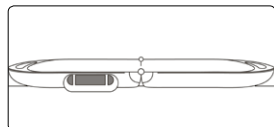

3. Erste Schritte

3.3 Umgang mit Batterien

Batterieanforderungen: 4 x 1,5V AAA (LR03)

HINWEIS:

Um Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden:

- I Achten Sie darauf, die + und – Symbole wie auf dem Batteriefach angegeben zu positionieren.
- I Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- I Entfernen Sie leere Batterien immer aus dem Produkt.
- I Verwenden Sie niemals einen Schraubenzieher oder einen anderen Gegenstand aus Metall, um die Batterien aus dem Batteriefach zu heben, dies könnte einen Kurzschluss auslösen.
- I Nur Batterien des gleichen Typs, wie vorgeschlagen, verwenden.
- I Der Versorgungsanschluss darf nicht kurzgeschlossen werden.
- I Entfernen Sie die Batterien, falls Sie die Waage längere Zeit nicht benutzen.
Nach der Entfernung der Batterien müssen die Geräte neu verbunden werden.

4. Benutzung der Waage

4.1 Sicherheitshinweise

⚠ **WARNUNG:** Babys bewegen sich sehr schnell und können von der Waage fallen. Um ernste Verletzungen zu vermeiden, muss immer ein Erwachsener nah genug sein, um das Baby festzuhalten. (siehe Abbildung 8)

⚠ **WARNUNG:** Heben Sie die Waage nicht an und klappen Sie die Waage nicht zusammen, wenn das Baby darauf liegt. Die Haut könnte eingeklemmt und Finger gebrochen werden. (siehe Abbildung 9)

⚠ **WARNUNG:** Trocknen Sie das Baby vor dem Wiegen ab. Nasse Babys können von der Waage rutschen und sich verletzen.

⚠ **WARNUNG:** Bringen Sie das Baby sofort nach dem Wiegen zurück in eine sichere Umgebung. Das Baby könnte von der Waage fallen, wenn Sie unaufmerksam sind.

⚠ **WARNUNG:** Nur von Erwachsenen zu benutzen. Minderjährige sind möglicherweise nicht in der Lage, Gefahren zu erkennen und Verletzungen zu verhindern.

HINWEIS: Öffnen, schließen und stellen Sie die Waage mit Vorsicht ab, um Schäden an den Scharnieren und der Waage zu vermeiden

Abbildung 8


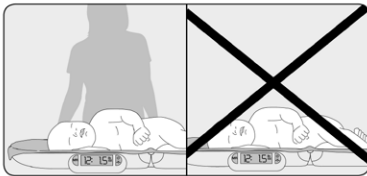


Abbildung 9

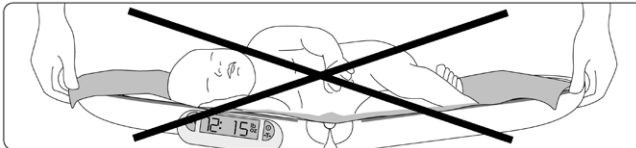

4. Benutzung der Waage

4.2 Wiegen und Tarieren


Schalten Sie die Waage ein. Drücken Sie die Taste, rechts neben der Anzeige, um die Waage einzuschalten. (siehe Abbildung 10)

Abbildung 10




Handtücher können auf die Waage gelegt werden, um dem Baby einen weicheren Untergrund zu bieten. (siehe Abbildung 11)

Abbildung 11

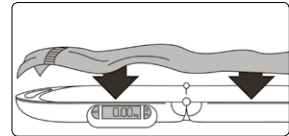


Drücken Sie die "Tarieren"-Taste, um das Gewicht des Handtuchs zu löschen. (siehe Abbildung 12)

Abbildung 12

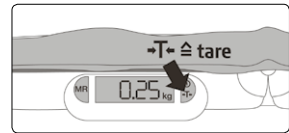


Die Waage subtrahiert das Gewicht des Handtuchs und zeigt wieder Null an. (siehe Abbildung 13)

Abbildung 13

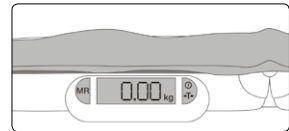


Nun können Sie das Baby von einem sicheren Ort holen. (siehe Abbildung 14)

Abbildung 14

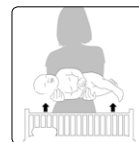

Legen Sie das Baby in die Mitte der Waage (siehe Abbildung 15).

Abbildung 15

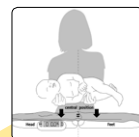

Stellen Sie sicher, dass das Baby keine Gegenstände in der Hand hält. Behalten Sie ihre Hände nahe beim Baby (ohne Berührung).


Das Gewicht wird in der Anzeige angezeigt.
(siehe Abbildung 16)

Abbildung 16




Bringen Sie das Baby sofort zurück in eine
sichere Umgebung. (siehe Abbildung 17)

Abbildung 17

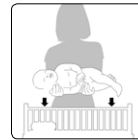

Ausschalten der Waage. Die Waage schaltet
sich nach ca. 2,5 Minuten automatisch aus.
Sie können die Waage manuell mit der „Ein-/
Aus“-Taste rechts neben der Anzeige aus-
schalten.

Abbildung 18

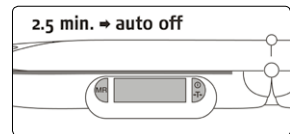

4.3 Speicherfunktion

Um gespeicherte Wiegeergebnisse anzusehen, drücken Sie die MR-Taste. Zunächst wird Ihnen die Nummer der Speicherung und nach zwei Sekunden das Ergebnis der Wägung angezeigt. Dieser Vorgang wird für alle gespeicherten Wiegeergebnisse wiederholt. Die Waage kann bis zu zehn Werte speichern.

4.4 Ändern der Einheit von kg zu lbs

Wenn die Waage eingeschaltet ist, drücken Sie die MR-Taste mindestens 15 Sekunden, bis sich die Gewichtseinheit von kg auf lbs oder umgekehrt umschaltet.

5. Datenübertragung

5.1 Sicherheitshinweise

⚠ **WARNUNG:** Babys bewegen sich sehr schnell und können von der Waage fallen. Um ernste Verletzungen zu vermeiden, bringen Sie das Baby sofort nach dem Wiegen zurück in eine sichere Umgebung.

HINWEIS: Überschreiten Sie die maximale Kapazität von 15 kg nicht, um Schäden an Ihrer Waage zu vermeiden.

HINWEIS: Im Falle einer Fehlfunktion kontaktieren Sie den Händler oder Medela GmbH. Nicht autorisierte Änderungen oder Reparaturen können Ihre Babywaage beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergewährleistung führen.

HINWEIS: Waagen dürfen nicht nass werden. Flüssigkeiten (z.B. Wasser, Babyurin) können die Waage beschädigen. Benutzen Sie ein trockenes Tuch, z.B. ein Handtuch, um die Waage direkt abzutrocknen nachdem Sie das Baby in eine sichere Umgebung zurückgebracht haben.

5.2 Koppeln der Geräte

Die medelaMe Babywaage ist für iPhone und iPad

- I Starten Sie die Bluetooth™ Verbindung auf Ihrem iOS-Gerät unter Einstellungen/Allgemein/Bluetooth.
- I Schalten Sie die Waage ein.
- I Die Waage zeigt "Pair" auf dem Display an und die blaue LED-Anzeige blinkt schnell.
- I Wählen Sie die Babywaage "medelaMe" auf Ihrem iOS-Gerät aus, um den Verbindungsprozess zu starten.
- I Ihr iOS-Gerät bestätigt die Verbindung mit "verbunden", anschließend im Batteriesparmodus mit "nicht verbunden".
- I Die Waage ist nun erfolgreich mit Ihrem iOS-Gerät verbunden.
- I Alle Messergebnisse werden an Ihr iOS-Gerät übertragen.
- I Um die Waage mit einem anderen iOS-Gerät zu verbinden, nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach während die Waage eingeschaltet ist und verbinden Sie das neue Gerät wie oben beschrieben.
- I Schließen Sie den Bereich Einstellungen auf ihrem iOS-Gerät, bevor Sie mit dem Wiegen beginnen.
- I Laden Sie sich die App "medelaMe" aus dem App-Store auf Ihr iOS-Gerät.

5.3 Gewichtsübertragung

- I Schalten Sie die Waage ein.
- I Das Bluetooth™ Modul ist aktiviert, wenn die blaue LED Anzeige alle 2 Sekunden blinkt.
- I Legen Sie das Baby in die Mitte der Waage.
- I Wenn die Gewichtsanzeige stabil ist, werden die Gewichtswerte (und gespeicherte Ergebnisse) übertragen.
- I Das Gewicht wurde in die medelaMe App mit entsprechendem Datum und Zeit importiert.*
- I Nehmen Sie das Baby von der Waage, um mit der nächsten Wägung fortzufahren; ansonsten schaltet sich die Waage automatisch ab.



Notiz:

- I Die Waage übermittelt nur Gewichtswerte über 500 g, Gegenstände die unter diesem Gewicht liegen, können tariert werden.
- I Hat das Verbinden nicht funktioniert oder die Daten konnten nicht übertragen werden, zeigt die Waage "noApp" an.

* Stellen Sie sicher, dass keine andere App geöffnet ist. Sollte die medelaMe App noch nicht installiert sein, fragt Sie Ihr iOS-Gerät nun, ob Sie die App aus dem App-Store herunterladen möchten.

Weitere Informationen zur App finden Sie im Internet unter:

www.medela.com/medelaMe

5. Datenübertragung

5.4 Bluetooth™ Aktivierung/Deaktivierung

- I Standardmäßig ist in der Waage die Bluetooth™-Verbindung aktiviert.
- I Zum Deaktivieren des Bluetooth™ Moduls halten Sie die MR-Taste gedrückt und drücken Sie die On/Off-Taste kurz. Die blaue LED-Anzeige blinkt nicht mehr.
- I Für die Aktivierung gilt dieselbe Vorgehensweise wie bei der Deaktivierung. Die blaue LED-Anzeige blinkt alle 2 Sekunden.

5.5 Anmerkung



Bluetooth™-Symbol: Das Bluetooth® Warenzeichen und Logo sind registrierte Marken der Bluetooth SIG, Inc.

6. Tipps und Fehlerbeseitigung


6.1 Fehlerbeseitigung

I Batteriestatus

Das Display zeigt <Lo> an, wenn die Batterien leer sind. Nehmen Sie die leeren Batterien heraus und benutzen Sie neue Batterien. (siehe Abbildung 20)

HINWEIS: Nach dem Einlegen neuer Batterien müssen die Geräte neu miteinander verbunden werden.

Abbildung 20

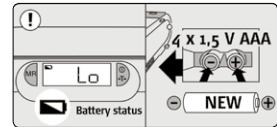


I Überlastmeldung

Die Waage hat eine maximale Kapazität von 15 kg. Befindet sich mehr Gewicht auf der Waage, zeigt diese <O-Ld> an. Sie müssen das Gewicht entfernen. (siehe Abbildung 21)

HINWEIS: Gewichte über der Kapazität von 15 kg können zu Schäden an Ihrer Waage führen.

Abbildung 21

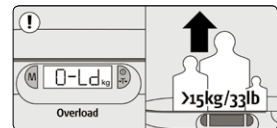

6.2 Reinigung

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und handelsübliche Reinigungsmittel zum Reinigen der Waage.

HINWEIS: Benutzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.

6.3 Wartung

Die messtechnische Kontrolle wurde durch den Hersteller durchgeführt. Die Waage bedarf keiner routinemäßigen Wartung. Es ist jedoch sinnvoll, die Genauigkeit in periodischen Abständen zu kontrollieren. Die Häufigkeit hängt vom Einsatz und Zustand der Waage ab. Bei festgestellten Abweichungen (bei 15 kg \geq 50 g, bei 33 lbs \geq 2 oz) kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Service-Partner. Reparaturen dürfen nur von einer durch Medela GmbH autorisierten Stelle unter Verwendung von Originalteilen durchgeführt werden. Für den Fall, dass es notwendig ist die Waage zurückzuschicken, bewahren Sie die Originalverpackung auf.

6. Tipps und Fehlerbeseitigung

6.4 Entsorgung

Die Babywaage enthält nach dem derzeitigen Wissensstand keine speziell umweltgefährdenden Stoffe. Dieses Produkt ist nicht als normaler Abfall zu behandeln, sondern muss an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihre Gemeinde, die kommunalen Entsorgungsbetriebe oder der Firma, von der Sie das Produkt gekauft haben.

Batterie-Entsorgung: Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben.

Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium,
Hg = Batterie enthält Quecksilber.



6.5 Rechtliche Hinweise

iPhone® und iPad® sind Warenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert sind.

“Made for iPhone” und “Made for iPad” bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör, speziell für den Anschluss an iPhone und iPad entwickelt wurde und vom Entwickler zertifiziert wurde und den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und rechtlichen Standards. Bitte beachten sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit iPhone und iPad ihre Wireless-Leistung beeinflussen kann.

7. Gewährleistung / Haftung

Soweit ein vom Hersteller zu vertretender Mangel der gelieferten Sache vorliegt, ist Medela GmbH berechtigt, wahlweise den Mangel entweder zu beseitigen oder Ersatz zu liefern. Ersetzte Teile werden Eigentum von Medela GmbH. Schlägt die Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung fehl, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gewährleistungszeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie die Rechnung als Nachweis auf. Im Servicefall kontaktieren sie bitte Ihren Händler oder Medela GmbH.

Keine Gewähr wird insbesondere übernommen für Schäden, die aus den nachfolgenden Gründen entstehen: Ungeeignete, unsachgemäße Lagerung oder Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder durch Dritte, natürliche Abnutzung, Veränderung oder Eingriffe, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, insbesondere übermäßige Beanspruchung, chemische, elektrochemische, elektrische Einflüsse oder Feuchtigkeit, sofern diese nicht auf ein Verschulden des Herstellers zurückzuführen sind. Sollten betriebliche, klimatische oder sonstige Einflüsse zu einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse oder des Materialzustandes führen, entfällt die Gewährleistung für die einwandfreie Gesamtfunktion der Geräte.

Originalverpackung für einen eventuellen Rücktransport aufbewahren.



Distributed by:

Medela Medizintechnik
GmbH und Co. Handels KG
Georg-Kollmannsberger-Straße 2
D-85386 Dietersheim
Telefon +49 (0)89 31 97 59-0

Designed by:



Soehnle Professional GmbH & Co. KG
Manfred-von-Ardenne-Allee 12
D-71522 Backnang
Germany